

Návod k obsluze



Anatome SM647
SM647A Pevná výška
SM647B Nastavitelná výška

145202(2)

Informace uvedené v tomto Návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění, společnost Hill-Rom nenesse odpovědnost za následky takových změn. Žádná část tohoto Návodu nesmí být reprodukována nebo předávána dál jakýmkoliv elektronickým nebo mechanickým prostředkem, včetně fotokopírování, ukládání do souborů nebo jiným způsobem ukládání pro zpracování a publikování informací, za jakýmkoliv jiným účelem než je osobní použití vlastníkem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hill-Rom.

POZNÁMKA

Pro lepší porozumění a použitelnost obrázku může být poloha symbolu odlišná od ergonomické polohy.

Některé z fotografií v tomto Návodu nejsou smluvně vázané.

SYMBOLY



Výstraha, pozorně
si přečtěte pokyny
týkající se bezpečnosti

SHODA



- Výrobek splňuje základní požadavky směrnice
93/42/CEE pro zdravotnická zařízení třídy I.

VÝROBCE

Hill-Rom
B.P. 14 – Z.I. du Talhouët
56330 PLUVIGNER (FRANCE)
Tel.: (33) 2 97 50 92 12
Fax: (33) 2 97 50 92 03

Verze: Prosinec 2006

OBSAH

0. SEZNÁMENÍ S VAŠÍM MODELEM	3
1. ÚVOD	5
1.1 POUŽITÍ KŘESEL SM647	5
1.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OBECNÉ POUŽITÍ	5
1.3 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ	6
1.4 ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS	7
1.5 PŘEVOZ A SKLADOVÁNÍ	7
1.6 INSTALACE KŘESLA	7
2. CHARAKTERISTIKY	8
2.1 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	8
2.2 ROZMĚRY	8
3. POPIS	10
3.1 CELKOVÝ POPIS	10
4. POUŽITÍ	11
4.1 HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ZVEDÁNÍ (SM647B)	11
4.2 SKLÁPĚNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU	12
4.3 TRENDELENGURGOVA POLOHA SEDACÍHO A ZÁDOVÉHO DÍLU (SM647B)	13
4.4 SKLÁPĚCÍ PODPĚRKA HLAVY	15
4.5 BRZDY/POHYB (SM647B/DOPLŇKOVĚ SM647A)	16
4.6 BRZDY/POHYB (SM647A)	17
4.7 PODPĚRA NOHOU	18
4.8 PODPĚRKY PAŽÍ	19
4.9 ŘÍDÍCÍ MADLA	20
4.10 POLSTROVÁNÍ SEDADLA	20
4.11 PŘEMISŤOVÁNÍ	21

5. ČIŠTĚNÍ	22
5.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	22
5.2 OBECNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ	22
5.3 DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFIKOVÁNÍ KŘESLA	22
6. ÚDRŽBA	24
6.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	24
6.2 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA	24
7. PŘÍSLUŠENSTVÍ	25
7.1 GELOVÝ SEDACÍ POLŠTÁŘ (AC947A)	25
7.2 DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ	26
7.3 TÝLOVÁ OPĚRKA (AC901A)	27
7.4 PŘÍZPŮSOBITELNÝ STOLEK (AC969P)	28

0. SEZNÁMENÍ S VAŠÍM MODELEM

Níže jsou uvedeny různé funkce a charakteristiky odpovídající různým verzím v našem výrobním sortimentu. „Chcete-li určit verzi vašeho křesla, podívejte se na identifikační štítek na křesle.“

ANATOME SM647A

(Pevná výška)

Ovládání nastavení výšky podpěrek paží

Snímatelné polstrování

Sklápěcí podpěrka hlavy

Sestava na infúzní sety

Podpěra nohou

Sklápěcí zádový díl

ANATOME SM647B

Hydraulické ovládání zvedání

Sklápěcí hlavové a zádové opěry

Ovládání nastavení výšky podpěrek paží

Snímatelné polstrování

Sklápěcí podpěrka hlavy

Sestava na infúzní sety

Podpěra nohou

Sklápěcí zádový díl

MOŽNOSTI

Centrální brzdící systém na dvou kolech, z nichž jedno je říditelné

Kolečka *Ø 125 jednoduché kolečko*

Ø 125 dvojité kolečko

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC901A: Týlová opěrka
- AC941A: Výsuvný stojan na infúzní sety
- AC947A: Gelová sedací podložka
- AC969P: Přizpůsobitelný servírovací stolek

1. ÚVOD

1.1 POUŽITÍ KŘESEL SM647

⚠ Křeslo ANATOME SM647 je navrženo pro jednotky obecné péče, chirurgii, ambulantní chirurgii a dlouhodobou léčebnou péči. Lze jej používat k převážení pacienta nebo k přemísťování pacienta z židle na lůžko a obráceně.



1.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OBECNÉ POUŽITÍ

Před použitím je nutné si pozorně přečíst tento Návod. Tento Návod obsahuje informace potřebné pro běžné používání a údržbu a je zárukou optimální bezpečnosti.

1.2.1 Brždění a pohyblivost

Pokud není třeba křeslem pohybovat nebo pokud je pacient ponechán bez dozoru, je třeba křeslo znehybnit pomocí brzdného systému. Zkuste pak křeslem pohnout a ověřte si tak, že je znehybněno.


Rizika, pokud křeslo není znehybněno:

- **pacient může spadnout, pokud se na křesle nakloní při pokusu o zvednutí nebo usednutí (při přecházení z lůžka na křeslo nebo z křesla na lůžko).**

Pokud je pacient převážen, musí být podpěra nohou sklopena dolů, aby mohla podepírat jeho chodidla.

1.2.2 Pohyb na nakloněné rovině

V zájmu bezpečnosti pacienta je nutné při pohybu po nakloněné rovině (maximálně 5°) mít křeslo nasměrováno tak, aby byl pacient čelem ke svahu.

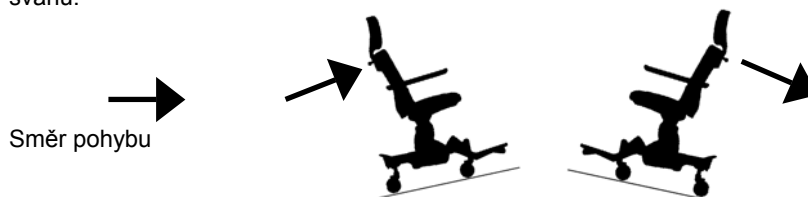

1.2.3 Nastavení křesla

Doporučujeme nastavit zádovou opěru a nastavit sedací a zádový díl do polohy Trendelenburg, zdvihnout podpěrky paží a nastavit výšku (SM647B) pro optimální pohodlí pacienta. Tímto dosáhnete polohy pohodlné pro pacienta a snížíte tak riziko možného pádu, zvláště pokud není pacient pod dohledem.

Pokud má být provedena nějaká manipulace s pacientem, použijte funkci výškového nastavení křesla (SM647B) pro nastavení vhodné ergonomické polohy.

1.2.4 Podpěrky paží a podpěra nohou

Používat podpěrky paží je doporučeno vždy, když je pacient v křesle. Podpěrky umístěné v horní poloze nejsou určeny jako pomůcka pro znehybnění pacienta.

Ošetřující personál s odpovídající kvalifikací by měl určit potřebný stupeň fixace pacienta nutný pro jeho bezpečné umístění na křesle.

Podpěra nohou není určena k tomu, aby byla používána jako stupátko. Je vybavena bezpečnostním nárazníkem chránícím před převrácením a nárazy.

1.2.5 Čištění a schválené prostředky

Po čištění se ujistěte, že je židle zcela vysušena a že všechny její funkce pracují normálně.

Používejte pouze schválené čisticí prostředky.

1.2.6 Náhradní díly a příslušenství

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Neupravujte křeslo bez předchozího souhlasu výrobce. Jakékoliv úpravy mohou negativně ovlivnit bezpečnost pacienta a odolnost materiálu.

1.3 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



Nesprávné používání křesla může způsobit riziko nadměrného opotřebení nebo nehody.

Příklady nesprávných způsobů použití:

- použití osobami, které se neseznámily s tímto Návodem nebo jim nebylo podáno vysvětlení zkušeným uživatelem,
- použití funkcí a příslušenství nebo pohyb křeslem prováděný dítětem,
- použití křesla k usazení dítěte do věku 4 let,
- použití spodní části k uložení zavazadel,
- zvedání zatížení nad 135 kg,
- použití křesla se zatížením nad 135 kg (normální provozní zatížení),
- použití podpěry nohou pro nastoupení na křeslo,
- stavění se na podpěru nohou,
- používání příslušenství nebo součástí, které nebyly doporučeny výrobcem,
- pojiždění s křeslem pomocí podpěrek paží,
- použití podpěrek paží jako sedátek,
- omývání nadměrným množstvím vody, proudem tlakové vody nebo v mycím zařízení,
- použití venku nebo pro užití k převozu pacienta uvnitř vozidla,
- pohyb na nepevném nebo neupraveném povrchu,

- pohyb na nakloněné rovině se sklonem nad 5° (s nebo bez pacienta),
- ovládání sklopné páčky zádového dílu podpěry nohou,
- *nebo jakýkoliv jiný způsob použití neodpovídající normálnímu použití křesla pro osoby s omezenou pohyblivostí.*

1.4 ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka na naše křesla může být částečně omezena nebo zcela zneplatněna následkem:

- jakéhokoliv neschváleného zásahu na:
 - . pístech,
 - . různých mechanismech,
- jakýmkoliv nenormálním způsobem použití,
- montáží nebo použitím součástí či příslušenství, které nejsou schválené výrobcem,
- jakýchkoliv postupů čištění, které nejsou v souladu se specifikovanými podmínkami.

1.5 PŘEVOZ A SKLADOVÁNÍ

Během převážení je třeba dodržovat veškerá doporučení, aby byl převoz proveden co nejbezpečnějším způsobem.

Během převážení musí být křeslo:

- zakryto,
- zabržděno,
- upoutáno.

Během skladování musí být křeslo:

- zakryto,
- zabržděno,
- v suché atmosféře,
- při teplotě mezi 0 °C až 40 °C.

1.6 INSTALACE KŘESLA

Před instalací lůžka je nutné si pozorně přečíst tento Návod. Obsahuje pokyny pro každodenní používání a pro údržbu a zajistí vám vyšší úroveň bezpečnosti.

Veškerý personál musí být vyškolen v používání křesla a příslušenství a seznámen s riziky vyplývajícími z užití křesel s elektrickým pohonem.

Před instalací a vždy po vyskladnění křesla a jeho příslušenství:

- vyčkejte, dokud teplota křesla a jeho součástí nedosáhne pokojové teploty,
- vyčistěte/desinfikujte,
- ujistěte se, že funkce lůžka pracují normálně,

2. CHARAKTERISTIKY

Společnost Hill-Rom postupuje dle politiky stálého vylepšování svých produktů. Z tohoto důvodu se mohou některé vlastnosti změnit bez předchozího upozornění.

2.1 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

2.1.1 Charakteristiky křesla

<i>Typ</i>	ANATOME
<i>označení</i>	SM647
<i>Provozní zatížení</i>	135 kg
<i>Max. zvedané zatížení</i>	135 kg
<i>Max. zvedané zatížení (bez příslušenství) SM 647A</i>	45,00 kg
<i>Max. zvedané zatížení (bez příslušenství) SM 647B</i>	58,00 kg

2.1.2 Hydraulické čerpadlo

- Dynamická síla : 10 kN. max.
- Statická síla : 12,5 kN. max.

2.2 ROZMĚRY

	SM647A	SM647B
<i>Max. rozměry (d × š × v) v mm</i>	1090 × 680 × 1345	1090 × 680 × 1500
	SM647A (pevná výška)	SM647B
<i>Výška sedadla v mm</i>	510	
<i>Dolní poloha výšky sedadla v mm</i>		475 ±10
<i>Horní poloha výšky sedadla v mm</i>		705 ±10


	Horní poloha	Střední polohy		Zatažená poloha
<i>Poloha podpěrky paží vzhledem k sedadlu v mm</i>	235	195	155	0

		Min	Max
<i>Úhel k vodorovné ploše</i>	Sedadlo *	5°	20°
	Zádový díl	110°	155°

* s možností sklápění vzad

POZNÁMKA: *Toto jsou přibližné hodnoty. Mohou se mírně lišit podle výrobních tolerancí.*

CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)

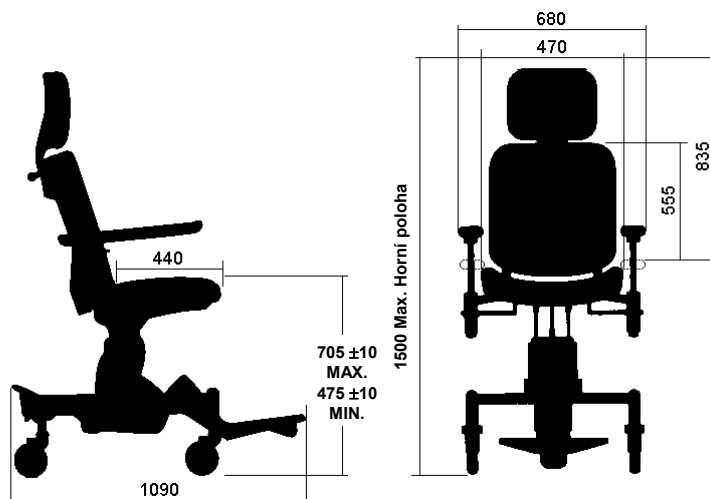

CHARAKTERISTIKY

3. POPIS

3.1 CELKOVÝ POPIS

3.1.1 Verze SM647A



3.1.2 Verze SM647B



4. POUŽITÍ

4.1 HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ZVEDÁNÍ (SM647B)

Nastavení výšky zadového a sedacího dílu je ovládáno pomocí dvoustranného nožního pedálu.




Před použitím této funkce se ujistěte, že pod sedadlem nejsou žádné předměty nebo osoby (zvláště děti).



- Pro zdvižení sedacího a zadového dílu:

. Pumpujte jedním ze dvou pedálů, dokud není dosaženo požadované výšky.

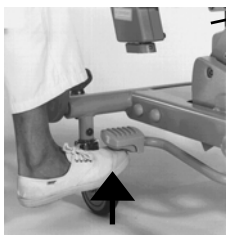

- Pro spuštění sedacího a zadového dílu:

. Zdvihněte jeden ze dvou pedálů, dokud není dosaženo požadované výšky.



Funkci výškového nastavení křesla lze užívat pouze za pomoci další osoby.

4.2 SKLÁPĚNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU

Funkce sklápění zádového dílu je ovládána pomocí jedné ze dvou páček na stranách (s hedvábným potahem). Při sklápění musí být podpěrka hlavy zajištěna.



POUŽITÍ



I když je pohyb poháněn, je někdy nutné napomoci zatlačením či zatažením nebo odlehčit zádový díl při změně náklonu.

- Pro sklopení zádového dílu dozadu:

- . uchopte zádový díl za jedno madlo,
- . zdvihněte jednu z páček a podržte ji,
- . sklopte zádový díl dozadu pomocí madla (pro usnadnění pohybu),
- . uvolněte páčku, pokud je dosaženo požadovaného úhlu.



- Pro zdvižení zádového dílu:

- . uchopte zádový díl za jedno madlo,
- . zdvihněte jednu z páček a podržte ji,
- . zdvihněte zádový díl pomocí madla (pro usnadnění pohybu),
- . uvolněte páčku, pokud je dosaženo požadovaného úhlu.

POZNÁMKA: Tuto funkci smí používat i pacient.

4.3 TRENDELENGURGOVA POLOHA SEDACÍHO A ZÁDOVÉHO DÍLU (SM647B)

4.3.1 Trendelengurgova poloha sedacího a zádového dílu

Trendelenburgovy polohy (sklopení sedacího a zádového dílu dozadu) dosáhnete použitím dvou páček po stranách (páčky pro sklápění zádového dílu). Při naklápění do polohy Trendelenburg musí být podpěrka hlavy zajištěna.



I když je pohyb poháněn, je někdy nutné napomoci zatlačením či zatažením nebo odlehčit zádový díl při sklápění do polohy Trendelenburg.

- Pro sklopení sedacího a zádového dílu:
 - . uchopte zádový díl za jedno madlo,
 - . spustíte jednu z páček a podržte ji,
 - . sklopte sedací a zádový díl dozadu pomocí madla (pro usnadnění pohybu),
 - . uvolněte páčku, pokud je dosaženo požadovaného úhlu polohy Trendelenburg.
- Pro návrat sedacího a zádového dílu do normální polohy:
 - . uchopte zádový díl za jedno z madlo,
 - . spustíte jednu z páček a podržte ji,
 - . sklopte sedací a zádový díl zpět do původní polohy pomocí madla zádového dílu (pro usnadnění pohybu),
 - . páčku uvolněte po dokončení pohybu.



POUŽITÍ

POZNÁMKA: Tuto funkci smí používat i pacient.

4.3.2 Trendelengurgova poloha sedacího a zádového dílu a sklápění zádového dílu

Aby bylo možné dosáhnout optimální pohodlné polohy pro pacienta, je možné tyto dvě funkce kombinovat.



POUŽITÍ

- Pro usnadnění této kombinace:
 - . nejdříve sklopte zádový díl dozadu (viz odstavec 4.2),
 - . pak sklopte sedací a zádový díl (viz odstavec 4.3.1).
- Pro návrat do původní polohy:
 - . nejdříve zdvihněte zádový díl (viz odstavec 4.2),
 - . pak pohněte sedací a zádový díl vpřed (viz odstavec 4.3.1).

4.4 SKLÁPĚCÍ PODPĚRKA HLAVY

Podpěrku hlavy je pro dosažení vyššího stupně pohodlí pacienta možné umístit do 3 poloh zajištěných zářezem včetně úplného sklopení.

- Pro změnu polohy:
 - . uchopte podpěrku hlavy jednou rukou,
 - . stiskněte tlačítko označené „PRESS“,
 - . přesuňte podpěrku hlavy do požadované polohy:
 - do zářezu,
 - do sklopené polohy.



Změna polohy

POZNÁMKA: Sklopená poloha podpěrky hlavy se obvykle používá při přemísťování pacienta (z křesla na lůžko a obráceně).



Horní poloha



Zasunutá poloha


4.5 BRZDY/POHYB (SM647B/DOPLŇKOVĚ SM647A)

4.5.1 Brždění

Brzdový systém se dvěma pedály umístěnými přímo u zadních koleček působí současně na obě zadní kola. Tyto pedály jsou umístěny nad oběma zadními kolečky. Dva pryžové pedály brzd rovněž fungují jako nárazníky.



POUŽITÍ

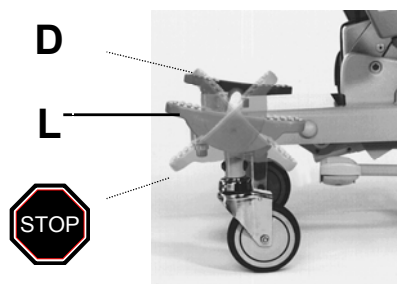

Poloha D:

- všechna čtyři kolečka se otáčejí, pouze jedno ze zadních koleček udává směr pohybu (nedá se s ním zatáčet), čímž se usnadňuje jízda v přímém směru.

Poloha L:

- všechna čtyři kolečka se pohybují a otáčejí zcela volně,
- křeslem lze pohybovat všemi směry.

Poloha STOP:

- obě zadní kolečka jsou zablokována,
- křeslem není možno pohybovat.



Pokud je křeslo zabržděno, ověřte funkci brzd tím, že jim zkusíte pohnout.

4.5.2 Pohyb

Pro přemístění křesla na rovině:

- uchopte dvě madla za zádovným dílem,
- uvolněte brzdu posunutím pedálu do polohy „L“ nebo „D“ (viz odstavec 4.5.1),
- s křeslem lze pohybovat, použijte madla k jeho řízení.



Je-li v křesle přepravován pacient, je nutno vždy sklopit podpěru nohou a podpěrky paží musí být zdviženy do horní polohy, čímž se zamezí případnému vypadnutí pacienta.



Pro usnadnění vyjetí s křeslem v přímém směru nastavte brzdový pedál do polohy „D“.



Při poježdění s pacientem na nakloněné rovině postupujte podle bezpečnostních pokynů (odstavec 1.2.2).

4.5.3 Dvojitá kolečka (doplňková)



4.6 BRZDY/POHYB (SM647A)

4.6.1 Brždění

Křeslo SM647A je vybaveno samostatnou brzdou na každém zadním kolečku.





Pokud jsou obě kolečka zabržděna, ověřte funkci brzd tím, že jím zkusíte pohnout.

4.6.2 Pohyb

Pro přemístění křesla na rovině:


- Uchopte dvě madla za zádočným dílem,
- Uvolněte obě brzdy,
- S křeslem lze pohybovat, použijte madla k jeho řízení.

 *Je-li v křesle přepravován pacient, je nutno vždy sklopit podpěru nohou a podpěrky paží musí být vždy zdviženy do horní polohy, čímž se zamezí případnému vypadnutí pacienta.*

 *Při pojíždění s pacientem na nakloněné rovině postupujte podle bezpečnostních pokynů (odstavec 1.2.2).*

4.7 PODPĚRA NOHOU

Podpěra nohou dovoluje pacientovi zaujmout pohodlnou polohu pro sezení v křesle, dovoluje mu se opřít, poskytuje mu stabilitu a v případě nárazu chrání jeho nohy zepředu.

 *Je-li v křesle přepravován pacient, je nutné vždy sklopit podpěru nohou.*




Sklopení nožní opěry



Zdvižení nožní opěry

Změnu polohy podpěry nohou můžete provést rukou nebo nohou. Podpěru nohou stačí zdvihnout nebo spustit dolů.

POZNÁMKA: *Mechanismus podpěry nohou je navržen tak, aby se při čelním nárazu nemohla podpěra nohou samovolně sklopit.*

-  - *Nepoužívejte podpěru nohou jako stupátko při usedání do křesla.*
- *Nestoupejte si na podpěru nohou.*

4.8 PODPĚRKY PAŽÍ

Výšku obou podpěrek paží lze nastavit do čtyřech různých poloh:

- horní poloha,
- dolní poloha, na úrovni sedací části,
- dvě střední polohy.



POZNÁMKA: Podpěrka paží musí být při přemísťování pacienta sklopena.

Pro spuštění podpěrky paží:

- prstem zdvihnete západku pod podpěrkou paží a podržte ji,
- spustíte podpěrku paží do požadované polohy,
- uvolníte západku,
- ujistěte se, že je správně nastavena.



Pro zdvižení podpěrky paží:

- zdvihnete podpěrku paží do požadované polohy:
- ujistěte se, že je správně nastavena.



POUŽITÍ

4.9 ŘÍDÍCÍ MADLA

Řídící madla se nacházejí na zadní straně zádového dílu a umožňují pohyb křeslem v požadovaném směru.



POUŽITÍ

4.10 POLSTROVÁNÍ SEDADLA

Polstrování křesla (sedadlo, zádový díl, podpěrka hlavy) lze snadno sejmout. Při manipulaci postupujte podle níže uvedeného obrázku.



4.11 PŘEMISŤOVÁNÍ

Přemísťováním pacienta rozumíme přemísťování ošetřujícím personálem z lůžka na křeslo a z křesla na lůžko.

V takovém případě musí být křeslo umístěno co nejbližší k lůžku, aby mohl být pacient přemístěn za ideálních podmínek a s nejvyšší bezpečností.



POUŽITÍ

Nastavení křesla pro přemísťování z křesla na lůžko a obráceně:

- brzdy zabrzděné,
- výška sedadla shodná s výškou ložné plochy na lůžku,
 - . pro křeslo SM647A (pevná výška) nastavte výšku lůžka,
- úhel sklonu zádového dílu shodný s úhlem sklonu zádové části lůžka,
- Trendelenburg v normální poloze,
- sklopená podpěrka hlavy a podpěra nohou,
- sklopené podpěrky paží.



Ověřte si, že byly dodrženy všechny výše uvedené pokyny pro zajištění maximální bezpečnosti při přemísťování pacienta.

5. ČIŠTĚNÍ

Křeslo SM647 vyhovuje standardům D60 070, D61 070 a D61 071.

5.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nečistěte křeslo přebytečným množstvím vody, v mycím zařízení nebo za použití proudu tlakové vody,
- Použijte vodu o teplotě nižší než 60 °C.
- Po vyčištění nechte lůžko důkladně oschnout.

Nedodržíte-li výše uvedené pokyny, hrozí nebezpečí opotřebení nebo poškození křesla, narušení jeho použitelnosti a k zániku poskytované záruky.

5.2 OBECNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

POZNÁMKA 1 : Aby nevznikaly skvrny, je třeba rozlité kapaliny co nejdříve vytrít, než se kapalina dostane do materiálu.

POZNÁMKA 2 : Seznam doporučených produktů je u společnosti Hill-Rom® k dispozici na požádání.

VYHNĚTE SE NADMĚRNÉMU DÁVKOVÁNÍ Je nutné dodržte pokyny pro ředění (postupujte podle pokynů výrobců při ředění čistících a dezinfekčních prostředků).

Zvedáky lze čistit tekoucí vodou (za normálního tlaku) bez většího úsilí.

Zabraňte vysokému teplotnímu rozdílu mezi zvedáky a vodou.

- **Kovové části:** viz doporučení 5.3
- **Plastové části:** viz doporučení 5.3

Nedoporučené chemikálie: produkty založené na chlóru, formolu a fenolu a všechny druhy ředidel. Nepoužívejte brusiva, brusné pasty nebo brusné houbičky.

5.3 DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFIKOVÁNÍ KŘESLA

Tato doporučení nenahrazují protokol pro čištění platný ve vašem zdravotnickém zařízení.

Tato metoda dezinfekce je platná pro toto lůžko a příslušenství a umožňuje rychlejší a efektivnější čištění lůžka pro zamezení infekce.


5.3.1 Doporučené materiály a produkty

- Několik čistých hadrů na jedno použití.
- Pár rukavic.
- **Dezinfikující detergent** ředěný podle doporučení platných pro vaše zdravotnické zařízení (přičemž dbejte pokynů níže stran doporučených produktů) nebo dezinfikující sprej.

- Použijte **standardizovaný produkt** odpovídající AFNOR NF T 72-101 (nebo shodnému standardu) (baktericidní, aktivní proti BK, fungicidní a virucidní, aktivní proti HIV-1 a HBV-).

5.3.2 Doporučený postup čištění a dezinfekce

- Znečištění odstraňujte vždy shora dolů a postupujte od nejčistších k nejznečištěnějším částem.
- Nečistoty neoškrabujte, navlhčete podle potřeby hadřík vícekrát (příliš jej neždímejte).
- **Nechte prostředky uschnout po dobu doporučenou výrobcem**, aby dezinfekční prostředek dosáhl maximálního účinku.
- Opláchněte podle potřeby: postupujte podle pokynů výrobce dezinfekčního prostředku.
- Začněte čistit nejméně znečištěná místa a postupujte k více znečištěným. Mezi různě znečištěnými místy vyměňte hadřík.
- Použijte nový hadřík na každé další křeslo.
- Nechejte čistící a dezinfekční produkt působit a pak důkladně vysušte.

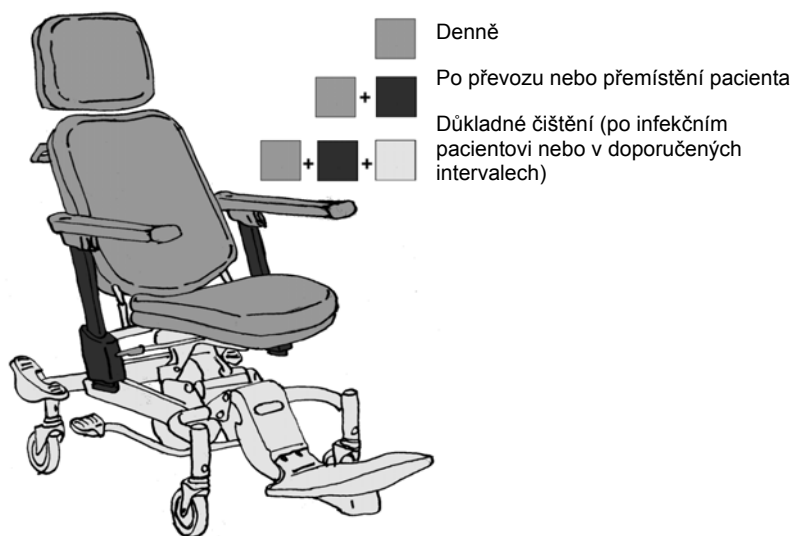

ČIŠTĚNÍ

5.3.3 Dekontaminační protokol

Doporučujeme vyplnit dekontaminační protokol pro každé křeslo.

- měsíc, číslo oddělení a pokoje, referenční označení lůžka.
- frekvence čištění, použité prostředky a produkty.
- MOŽNÉ INFEKCE.

6. ÚDRŽBA



6.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní a schválení pracovníci.

Před prováděním péče nebo údržby:

- ujistěte se, že jsou brzdy zabrzděny,

Nikdy neotevírejte nebo nepropichujte pneumatický píst (je pod vysokým tlakem).

Pokud nastanou jakékoliv potíže s písty nebo čerpadly (úniky, zatumnutí apod.), obraťte se na autorizovaný servis.

Opotřebené polstrování vyměňte, aby byly udrženy vlastnosti ochrany proti požáru a maximální úroveň hygieny.

6.2 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Pro zachování funkcí a výkonu křesla je doporučeno provádět ročně jeho kontrolu.

Hlavní funkce vyžadují zvláštní pozornost:

- brzdový systém,
- ovládací mechanismy (sklápění zádového dílu, Trendelenburg, podpěra nohou, zdvih),
- klouby pro jednotlivé pohyby křesla,
- polstrování sedadla a podpěrek paží.

Každých pět let je doporučena odborná prohlídka pístů, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost všech součástí křesla.

7. PŘÍSLUŠENSTVÍ

7.1 GELOVÝ SEDACÍ POLŠTÁŘ (AC947A)

Gelový sedací polštář je navržen pro křeslo ANATOMIE jako náhrada za polstrování sedadla.

Pacientům, kteří jsou odkázáni na dlouhodobé sezení v křesle, může gelový polštář pomoci předejít zdravotním komplikacím a současně zvýší jejich pohodlí.

**CE****PŘÍSLUŠENSTVÍ**

7.2 DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní část křesla je osazena dvěma objímkami, do kterých lze zasunout stojan na infúzní sety.

Křeslo je vybaveno 2 háky na vaky na sběr moči.



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Manipulace s výsuvným stojanem na infúze

Pro prodloužení stojanu na infúze:

- zdvihněte horní tyč do požadované výšky.


Pro zkrácení stojanu na infúze:

- podržte horní tyč, mírně ji zdvihněte (1) a zatlačte plastovou objímku (2) směrem dolů dvěma prsty stejné ruky,
- spustíte tyč,
- uvolníte objímku.

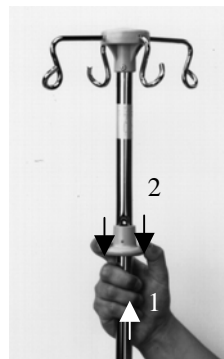

7.3 TÝLOVÁ OPĚRKA (AC901A)

Týlová opěrka je opatřena částí pro opření hlavy a dvěma postranními částmi, výšku opěrky lze nastavovat pomocí dvou popruhů.

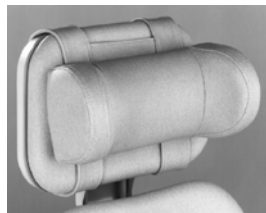

Týlová opěrka se upevňuje ke sklapovací podpěrce hlavy křesla pomocí svorek (clip) na každém popruhu.

Údržba:

- vlhká houbička
- mýdlová voda
- zředěné dezinfekční prostředky

POZNÁMKA: Potah týlové opěrky je opatřen rozpínacím zdrhovadlem, což umožňuje snadnou výměnu vnitřní pěnové hmoty v případě jejího poškození.

7.4 PŘIZPŮSOBITELNÝ STOLEK (AC969P)


Normální provozní zatížení:
20,00 kg⁽¹⁾

Stolek se upevňuje k podpěrkám pažím křesla pomocí dvoustranných svorek. Jeho poloha, kterou lze nastavit kdekoliv podél podpěrek paží, je přizpůsobitelná různým pacientům.




Dvoustranné lišty na spodní straně stolku určují jeho meze nastavení⁽²⁾.




 **Nepřekračujte toto omezení polohy.**



Pro upevnění nebo odstranění stolku rozpojte postranní svorky, jak je ukázáno na fotografii vedle.

 **Před montáží stolku se ujistěte, že jsou podpěrky paží správně nastaveny a jsou ve stejné výšce.**

 **Stolek nesmí být používán jako sedátko nebo stupátko: nebezpečí poškození stolku nebo pádu osoby, která jej takto používá.**

⁽¹⁾ Toto je zatížení předpokládané při normálním použití stolku, tato hodnota předpokládá značnou bezpečnostní rezervu.

⁽²⁾ VÝSTRAHA: Čím blíže jsou svorky k přednímu okraji podpěrek paží, tím vyšší je riziko ohrožení stability při používání.